




МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ

В домашних условиях

материалы составлены на основе
медицинского стандарта при
участии ведущих медицинских
специалистов

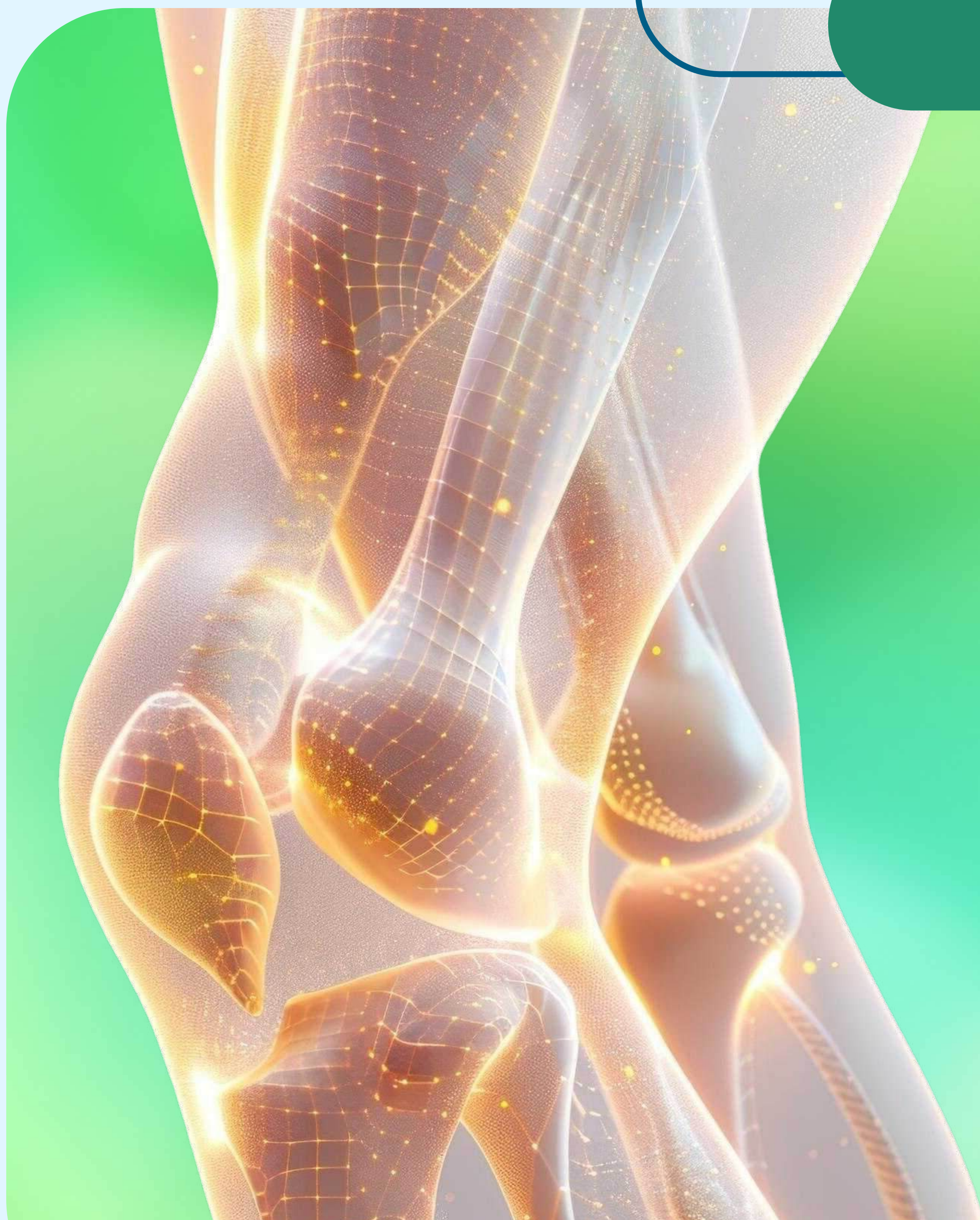

Почему наша методика даст вам результат?

Комплексное воздействие: аппарат объединяет ультразвуковую терапию, магнитотерапию и инфракрасное излучение, что позволяет лечить суставы сразу по нескольким направлениям: снимать боль, уменьшать воспаление, ускорять восстановление тканей и возвращать подвижность сустава.

Врач может назначить ультразвук или магнитотерапию как главные методы лечения суставов. Наши аппараты работают с двумя этими режимами.

Безопасность и удобство: методика и приборы разработаны с учетом медицинских стандартов, имеют безопасный протокол технических настроек, и поэтому подходят для ежедневного домашнего применения, просты в использовании и не требуют специальной подготовки.

Облегчение боли возможно уже после нескольких процедур, стойкий лечебный эффект и восстановление функций сустава чаще всего достигаются после курса 8–15 сеансов с возможностью повторения спустя 3–6 месяцев для профилактики рецидивов.

Персонализированный подход: методика позволяет индивидуально выбирать режим терапии и корректировать длительность по рекомендациям врача, обеспечивая максимальную эффективность при различных заболеваниях суставов, от артроза до последствий травм.

Варианты лечения в режиме ультразвука

1 вариант

с использованием нелекарственной
контактной среды

- ✓ Глицерин
- ✓ Специальные косметические гели для процедур
- ✓ Масла на растительной основ
- ✓ Алоэ- вера гель

2 вариант

Лекарственный фонофорез
с использованием
противовоспалительных мазей/
гелей (группа НПВП средств)

- ✓ Назначается врачом




Зоны применения при лечении в режиме ультразвука / фонофореза

Если боль сосредоточена в крупных суставах (плечевой, локтевой, коленный, тазобедренный)

Зона: наибольшей болезненности сустава

Нанести НПВП гель / мазь на зону сустава и на излучатель аппарата

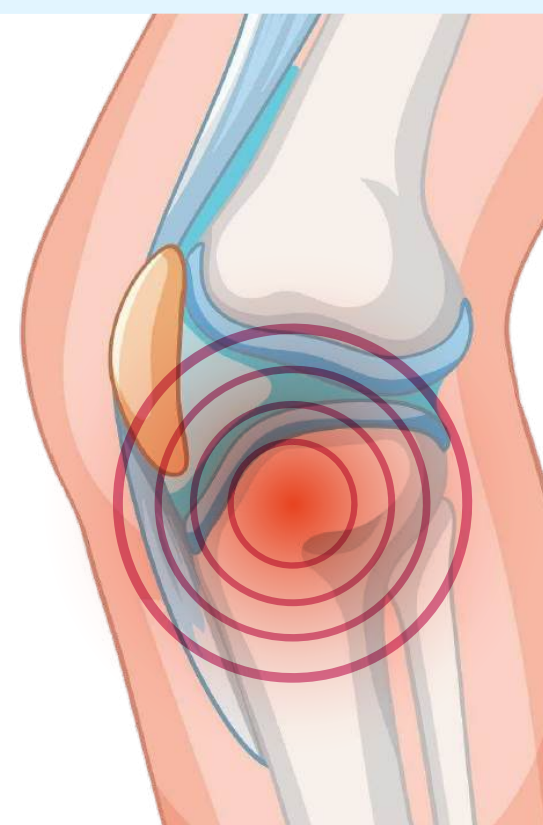

🕒 1 процедура

6-10 минут
на каждое поле

🕒 24 Частота процедур

ежедневно

🔄 Методика

подвижная - медленно
передвигать излучатель
аппарата по всей зоне
поражения

📅 На весь курс лечения

8 - 10 процедур

В один день воздействовать можно не более
чем на 2 сустава

Профилактический курс провести через 2-3
месяца после первого

Завершить процедуру
с помощью
специального
эмульгеля от Ретон —
нанести на болевую
зону после процедуры,
чтобы успокоить кожу
в зоне воздействия.




Важно!
Излучатель
направлять строго
перпендикулярно
зоне поражения.

Зоны применения при лечении в режиме ультразвука / фонофореза

Если боль сосредоточена в мелких суставах (суставы кистей, суставы стопы, межфаланговые суставы)

Зона: наибольшей болезненности сустава

Нанести НПВП гель / мазь на зону сустава и на излучатель аппарата

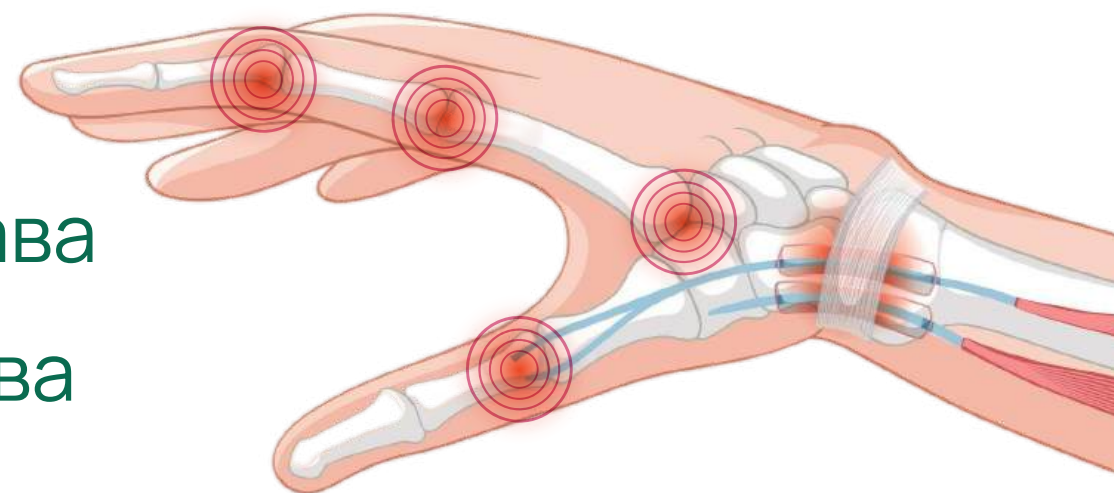

🕒 1 процедура

5 - 6 минут
на каждое поле

🕒 24 Частота процедур

ежедневно

🔄 Методика

подвижная - медленно
передвигать излучатель
аппарата по всей зоне
поражения

📅 На весь курс лечения

6 - 8 процедур

В один день воздействовать можно не более чем на 2 сустава

Профилактический курс провести через 2-3 месяца после первого

Завершить процедуру с помощью специального эмульгеля от Ретон — нанести на болевую зону после процедуры, чтобы успокоить кожу в зоне воздействия.



Важно!
Излучатель
направлять строго
перпендикулярно
зоне поражения.


Зоны применения при лечении в режиме магнитотерапии

Если боль сосредоточена в крупных суставах (плечевой, локтевой, коленный, тазобедренный)

Зона: наибольшей болезненности сустава

Нанести специальный гель для физиопроцедур для легкого скольжения излучателя по коже

Воздействовать на зону наибольшей болезненности

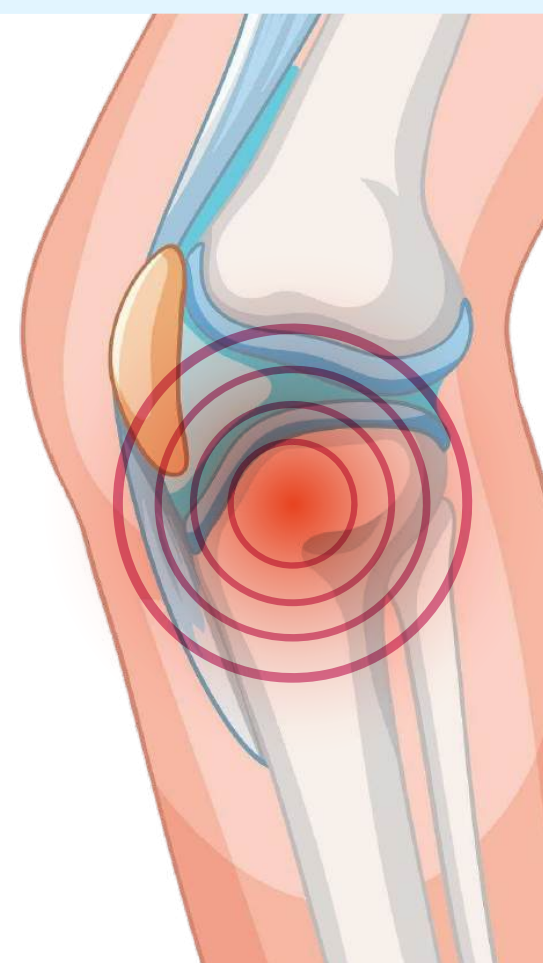

🕒 1 процедура

10 минут
на каждое поле

🕒 24 Частота процедур

ежедневно

🔄 Методика

подвижная - медленно
передвигать излучатель
аппарата по всей зоне
поражения

📅 На весь курс лечения

10 - 15 процедур

В один день воздействовать можно не более
чем на 3 сустава

Профилактический курс провести через 2-3
месяца после первого

Завершить процедуру
с помощью
специального
эмульгеля от Ретон —
нанести на болевую
зону после процедуры,
чтобы успокоить кожу
в зоне воздействия.



Важно!
Излучатель
направлять строго
перпендикулярно
зоне поражения.


Зоны применения при лечении в режиме инфракрасного излучения

Если боль сосредоточена в крупных суставах (плечевой, локтевой, коленный, тазобедренный)

Зона: наибольшей болезненности сустава

Нанести специальный гель для физиопроцедур для легкого скольжения излучателя по коже

Воздействовать на зону наибольшей болезненности

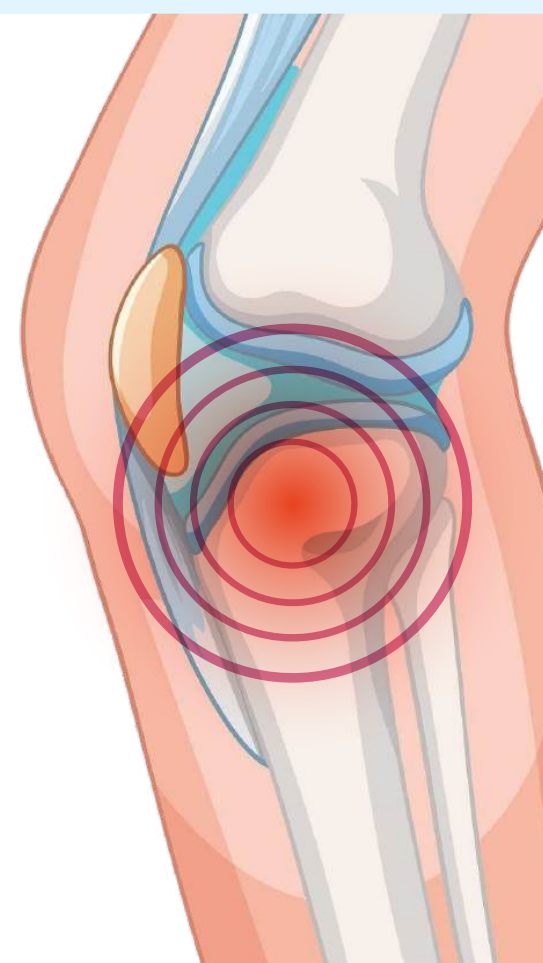

🕒 1 процедура

5 минут
на каждое поле

🕒 24 Частота процедур

ежедневно

🔄 Методика

подвижная - медленно
передвигать излучатель
аппарата по всей зоне
поражения

📅 На весь курс лечения

10 - 15 процедур

В один день воздействовать можно не более
чем на 4 сустава

Профилактический курс провести через 2-3
месяца после первого

Завершить процедуру
с помощью
специального
эмульгеля от Ретон —
нанести на болевую
зону после процедуры,
чтобы успокоить кожу
в зоне воздействия.



Важно!
Излучатель
направлять строго
перпендикулярно
зоне поражения.

Как лечат аппараты «Ретон»

1 стадия лечения

1 – 3 процедуры

Ограниченные движения сустава, постоянная резкая боль, атрофия мышц, отеки, сильная хромота. Лучи аппарата нацелены вглубь пораженной области. Нащупан очаг воспаления.



2 стадия лечения

4 – 6 процедур

Физиоизлучение начинает нейтрализовать воспаление. Снижается дискомфорт при движениях сустава, постепенно снижается боль после нагрузок и после ходьбы, уходят хромота и отеки.




3 стадия лечения

7 – 15 процедур

Очаг воспаления нейтрализован.

Сустав вновь активен, ушла боль во время ходьбы, исчезла хромота и общая утомляемость

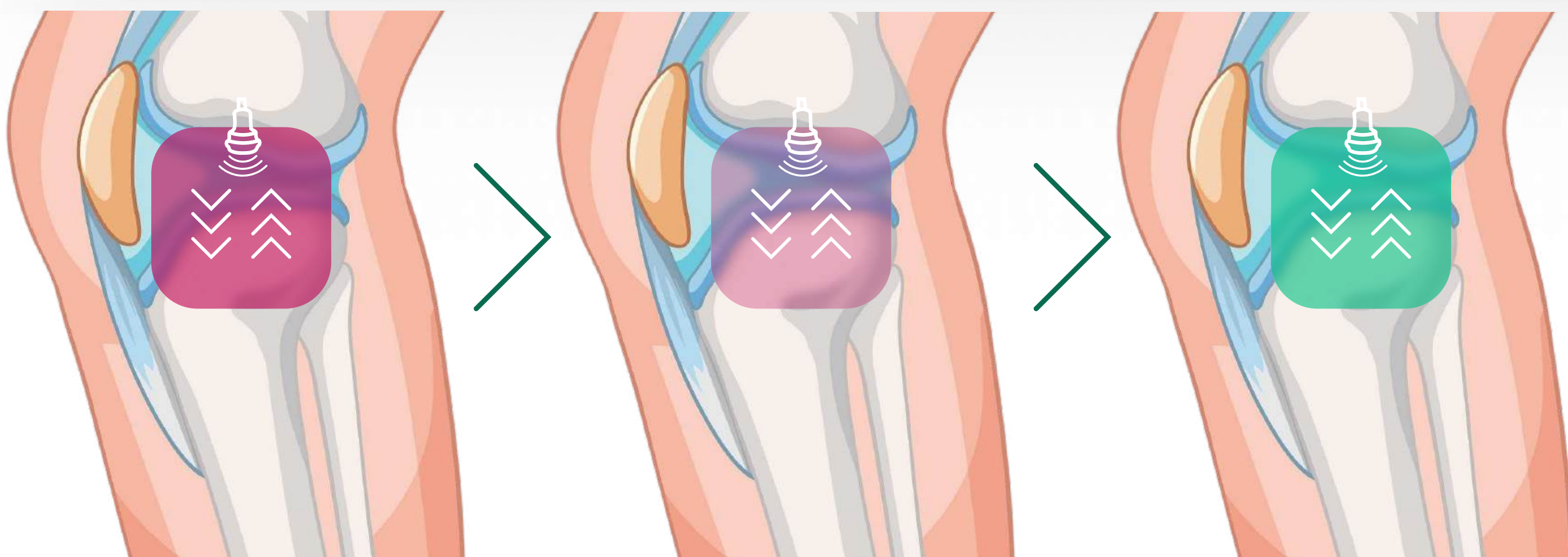

Где купить?

Закажите аппараты Ретон
в официальных магазинах

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

RETON

Напрямую у производителя



+7 923 444 77 05



На маркетплейсе



В аптеке у партнеров



АУТН-01 Ретон



Ультразвуковая терапия,
фонофорез

Ретон Форте



Ультразвуковая терапия,
инфракрасное излучение,
магнитотерапия, фонофорез

